



Детские электронные весы

seca 354

Инструкция по использованию



Поздравляем с покупкой!

www.mirvesov.ru

- Выбрав электронные весы для новорожденных seca 354, Вы получили износостойкий продукт высокой точности.

- Более 150 лет seca служит на благо здоровья и, являясь лидером на рынке многих стран, задаёт новые стандарты, создавая инновационную продукцию для измерения веса и роста.

- Весы для новорожденных и для более старших детей seca 354 предназначены для работы в медицинских учреждениях, чтобы определять вес младенцев при рождении и наблюдать, как они набирают вес с годами.



- Высокопрочные и износостойкие весы будут Вам служить долгие годы.

Безопасность

- Следуйте рекомендациям, указанным в Инструкции к применению
- Используйте элементы питания, рекомендованные в Инструкции
- Обращайтесь с весами бережно, не подвергайте падениям и повреждениям
- Проводите сервисное обслуживание устройства в специальных сервисных центрах


Установка весов

- Снимите упаковку и установите весы на ровную и крепкую поверхность.
- Установите люльку весов на весовую платформу и держите её ровно до тех пор,

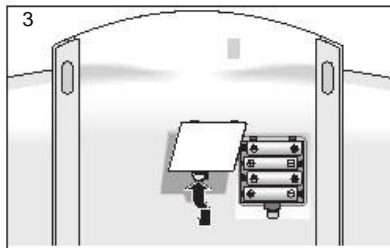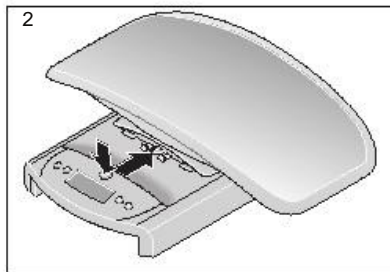

пока не услышите щелчок, а кнопка блокировки не окажется полностью на поверхности весовой платформы (рис.1). Теперь люлька весов закреплена на весовой платформе.

- Чтобы взвесить взрослого ребёнка на весовой платформе, снимите люльку, нажав кнопку блокировки (рис.2).

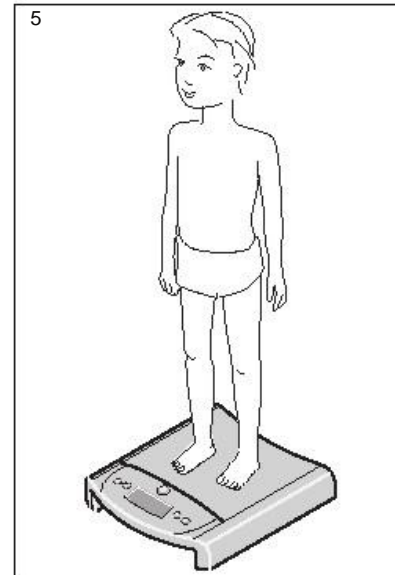

Питание

- Весы работают от 4 батарей типа AA, (входят в комплект).
- Весы экономно потребляют электроэнергию: одного комплекта батарей хватает на 20 000 взвешиваний.

Тел: (495) 921-44-57

- Соблюдайте полярность при установке батарей!!! www.mirvesov.ru
- Снимите люльку, переверните весы и откройте отсек для батарей (рис.3).
- Установите новые батареи в отсек для батарей, соблюдая полярность, и закройте крышку отсека для батарей.

Использование

Правильное взвешивание

- При весе от 500г автоматически активируется функция HOLD, которая позволяет при необходимости сначала убрать младенца с весовой люльки и затем посмотреть результат взвешивания.
- Нажмите зелёную кнопку, чтобы включить весы. На дисплее высветится „0“, после чего раздастся акустический сигнал. Весы готовы к использованию.
- Для взвешивания новорожденных: положите новорожденного на люльку (рис.4).
- Для взвешивания взрослых детей: удалите люльку с весовой платформы (рис.5).
- Установите весы на прочную и ровную поверхность. Ребёнок должен стоять на весовой платформе неподвижно.
- Прочитайте результат измерений на дисплее. Не нагружайте весы больше максимального предела взвешивания.
- Функция тарирования (TARE) позволяет определить вес младенца без учёта веса тары, например, одеяла или подушки, положенным на весы для комфорта маленького пациента.
- Положите на весы-кресло тару (одеяло или подушку), нажмите кнопку TARE, чтобы включить функцию тарирования, и дождитесь, пока на дисплее не высветится символ „0“.

www.mirvesov.ru

Внимание!

Активные движения ребёнка на люльке могут повлиять на правильность результата измерений.

- Нажмите START, чтобы выключить весы.

Функция определения количества выпитого молока

Данная функция позволяет определить количество молока, выпитого ребёнком во время кормления, или увеличение его веса по сравнению с последним взвешиванием. Функция позволяет ввести в память последнее значение веса младенца и использовать его, чтобы узнать разницу в весе до и после кормления.

- Чтобы ввести в память значение веса, по окончании взвешивания до кормления нажмите кнопку STO. На несколько секунд высветится символ M. После чего значение веса введено в память до следующего взвешивания.
- По окончании взвешивания после кормления нажмите кнопку STO, и на дисплее высветится разница между значением веса, введенного в память, и значением веса после последнего взвешивания.

Автоотключение весов/ экономия энергопотребления

Незагруженные весы отключатся через 20 секунд. После взвешивания результат измерения высвечивается на дисплее в течении 2 минут, после чего весы автоматически отключатся.

www.mirvesov.ru

Переключение единиц измерения

- Включите весы. www.mirvesov.ru Тел.: (495) 921-44-57
- Результат измерений высветится в последней использовавшейся единице измерения.
- Нажмите кнопку kg/lbs, чтобы поменять единицу взвешивания с кг на фунты и наоборот.
- На дисплее появится значение kg или lbs.

Уход за весами

При необходимости протирайте весы мягкой тканью с любым домашним моющим средством. Не используйте абразивные и концентрированные моющие средства, спирт, бензин и пр., чтобы не повредить весам.

Что делать, если...

- ... на дисплее не высвечивается значение веса на загруженных весах?
 - проверить, правильно ли установлены батареи
 - ... на дисплее высвечивается bAtt ?
 - недостаточное питание. Замените батареи.
- ... на дисплее St0P ?
 - перегрузка. Разгрузите весы.

Утилизация батарей

Не выбрасывайте использованные батареи вместе с пищевыми отходами. Обратитесь в специальные службы утилизации. Приобретайте батареи без содержания ртути (Hg), кадмия (Cd) и свинца (Pb).

Тел.: (495) 921-44-57

Технические характеристики
Размеры весов www.mirvesov.ru

Компания "Мир Весов"

Тел.: (495) 921-44-57

Высота: 165 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 330 мм
Вес: 2,5 кг

Допустимая температура

+10 °С до +40 °С

Макс. предел взвешивания 20 кг

Дискретность

0 до 10 кг 10 г

10 до 20 кг 20 г

Точность более $\pm 0,3 \%$ / ± 10 г

Функции Auto HOLD, TARE

Питание Батареи

Батареи 4 батареи типа AA, 1,5

Гарантийное обслуживание

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с законодательством РФ.

Гарантийное обслуживание не производится в случае повреждения весов либо их частей в результате ударов, попадания влаги внутрь весов, попытки самостоятельно разобрать весы, деформации вследствие перегрузок, при неаккуратном обращении и неправильной эксплуатации.

Компания "Мир Весов"
115409, Москва, ул. Москворечье
47,
корп. 2
Тел./ факс: (495) 921-44-57
<http://www.mirvesov.ru>
E-mail: mv@mirvesov.ru